



# SafeMask

αποστειρωμένη μάσκα  
με 10 φίλτρα

Καινοτομία  
με φίλτρο FFP2



## Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα προσώπου

με ευέλικτη εφαρμογή και εναλλάξιμο φίλτρο

[www.newopticalsolutions.gr](http://www.newopticalsolutions.gr)

Στερέωση του υφασμάτινου φίλτρου και των ελαστικών ταινιών.

Φίλτρο PP 150g/m<sup>2</sup>, ανταλλάξιμο,  
προστατεύει από μολύνσεις και από σταγονίδια.

Το βασικό σώμα είναι κατασκευασμένο από μαλακό ελαστικό υλικό,  
εξασφαλίζει άνεση στην εφαρμογή και υψηλή προστασία.

### ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Ο πρωταρχικός στόχος της μάσκας είναι η **προστασία** από σταγονίδια που εκτοξεύονται και από συναφείς ξένες λοιμώξεις.
- Τόσο ο εισπνεόμενος όσο και ο εκπνεόμενος αέρας οδηγείται μέσω της **στιβάδας του φίλτρου**, δεν διέρχεται μόνο από μία βαλβίδα.
- Το βασικό σώμα της μάσκας και το εξάρτημα στήριξης του φίλτρου μπορούν να **επαναχρησιμοποιηθούν** πολλές φορές.
- **Καθαρίζεται** με ζεστό νερό (θερμοκρασία άνω των 70° C) ή με εμπορικά διαθέσιμα απολυμαντικά.
- **Δεν υπάρχει άμεση επαφή με το φίλτρο** κατά την εφαρμογή ή την αφαίρεση της μάσκας.
- Πρέπει να **αντικαθίσταται μόνο το φίλτρο**. Περιλαμβάνει 10 φίλτρα.
- Η παραγωγή των πλαστικών μερών της μάσκας και των φίλτρων πραγματοποιείται **100% στη Γερμανία**.



Διατίθεται  
σε διάφορους χρωματισμούς.



12,5 cm πλάτος  
13,3cm μήκος  
5,5cm ύψος

TAKE STEPS TO  
**PROTECT  
YOURSELF**



**new**  
**optical**  
SOLUTIONS

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος  
Ελλάδας - Κύπρου - Βαλκανίων



Κολοκατρώνη 95, Πεύκη  
151 21, Αθήνα

Tel.: 210 802 3599

email: [info@newoptical.gr](mailto:info@newoptical.gr)



**επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα προστασίας προσώπου  
με ευέλικτη εφαρμογή και εναλλάξιμο φίλτρο**



**new**  
**optical**  
SOLUTIONS

● Κολοκοτρώνη 95, Πεύκη  
151 21, Αθήνα  
● Tel.: 210 802 3599  
● email : info@newoptical.gr





# SafeMask®

αποστειρωμένη μάσκα  
με 10 φίλτρα

Καινοτομία  
με φίλτρο FFP2



## Επαναχρησιμοποιούμενη παιδική μάσκα προσώπου με ευέλικτη εφαρμογή και εναλλάξιμο φίλτρο

[www.newopticalsolutions.gr](http://www.newopticalsolutions.gr)

Διατίθεται  
σε διάφορους  
χρωματισμούς



Στερέωση του υφασμάτινου φίλτρου και των ελαστικών ταινιών.

Φίλτρο PP 150g/m<sup>2</sup>, ανταλλάξιμο,  
προστατεύει από μολύνσεις και από σταγονίδια.

Το βασικό σώμα είναι κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό,  
εξασφαλίζει άνεση στην εφαρμογή και υψηλή προστασία.

Αφρώδες ελαστικό σφράγισμα για την περιοχή της μύτης, για ατομική ρύθμιση  
και βέλτιστη στεγανοποίηση για να προσφέρει ύψιστη προστασία.

### ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Ο πρωταρχικός στόχος της μάσκας είναι η **προστασία** από σταγονίδια που εκτοξεύονται και από συναφείς ξένες λοιμώξεις.
- Τόσο ο εισπνεόμενος όσο και ο εκπνεόμενος αέρας οδηγείται μέσω της **στιβάδας του φίλτρου**, δεν διέρχεται μόνο από μία βαλβίδα.
- Το βασικό σώμα της μάσκας και το εξάρτημα στήριξης του φίλτρου μπορούν να **επαναχρησιμοποιηθούν** πολλές φορές.
- **Καθαρίζεται** με ζεστό νερό (θερμοκρασία άνω των 70° C) ή με εμπορικά διαθέσιμα απολυμαντικά.
- **Δεν υπάρχει άμεση επαφή με το φίλτρο** κατά την εφαρμογή ή την αφαίρεση της μάσκας.
- Πρέπει να **αντικαθίσταται μόνο το φίλτρο**. Περιλαμβάνει 10 φίλτρα.
- Η παραγωγή των πλαστικών μερών της μάσκας και των φίλτρων πραγματοποιείται **100% στη Γερμανία**.



new  
optical  
SOLUTIONS

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος  
Ελλάδας - Κύπρου - Βαλκανίων



Κολοκοτρώνη 95, Πεύκη  
151 21, Αθήνα  
Tel.: 210 802 3599  
email: [info@newoptical.gr](mailto:info@newoptical.gr)

TAKE STEPS TO  
**PROTECT  
YOURSELF**






## Περιγραφή Προϊόντος

### Γενικές Πληροφορίες Προϊόντος

Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα προσώπου με ευέλικτη εφαρμογή και εναλλάξιμο φίλτρο.

### Στην συσκευασία περιλαμβάνονται:

1. Κύριο σώμα μάσκας
2. Στήριξη φίλτρου
3. Ελαστική ταινία
4. 10 x μη-υφασμένα προστατευτικά φίλτρα [150 gr/m<sup>2</sup> – PP]

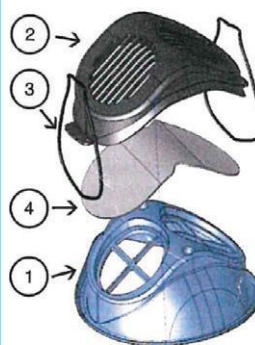

### Εφαρμογή

Η μάσκα προσώπου "Safe Mask" είναι μία επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα. Πριν από κάθε χρήση, το κύριο σώμα και το εξάρτημα στήριξης του φίλτρου πρέπει να καθαρίζονται σε ζεστό νερό (πάνω από 60° C) ή με ένα απολυμαντικό σπρέι που διατίθεται στο εμπόριο. Η μάσκα προσώπου "Safe Mask" πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τα φίλτρα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

### Οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή της μάσκας προσώπου "Safe Mask"

Αρχικά δέστε μαζί τα δύο άκρα της ελαστικής ταινίας [3] αφού τα τοποθετήσετε στις υποδοχές της ελαστικής ταινίας πάνω στη μάσκα.

Το ένθετο μη υφασμένο προστατευτικό φίλτρο [4] τοποθετείται στο κύριο σώμα της μάσκας [1] έτσι ώστε το άνοιγμα να καλύπτεται πλήρως. Στη συνέχεια, ευθυγραμμίζετε το εξάρτημα στήριξης του φίλτρου [2] στις δύο κεντρικές οπές και συνδέετε με το κύριο σώμα της μάσκας [1]. Στη συνέχεια, η μάσκα προσώπου μπορεί να τοποθετηθεί στο στόμα και τη μύτη. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Πλένετε καλά τα χέρια σας πριν εφαρμόσετε τη μάσκα.
- Κρατήστε τη μάσκα μπροστά από το πρόσωπό σας, έτσι ώστε οι δύο ελαστικές ταινίες που σχηματίζονται να κρέμονται ελεύθερα.
- Τοποθετήστε την πάνω πλευρά στο πρόσωπό σας.
- Προσαρμόστε την κάτω ελαστική ταινία στην περιοχή του λαιμού σας και την πάνω ελαστική ταινία στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
- Ελέγξτε κατά την πρώτη εφαρμογή της μάσκας ότι εισπνέετε κανονικά αέρα, παρά την εφαρμογή της μάσκας.

### Απόρριψη της μάσκας προσώπου "Safe Mask"

Τηρείτε τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς απόρριψης και τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς για την απόρριψη της μάσκας προσώπου και της συσκευασίας.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για το κύριο σώμα της μάσκας καθώς και για το εξάρτημα στήριξης του φίλτρου είναι ανακυκλώσιμα υλικά.

### Μεταφορά και φύλαξη

Για τη μεταφορά και την αποθήκευση, πρέπει να επιλέγετε την αρχική συσκευασία ή μια κατάλληλη σφραγισμένη συσκευασία που προστατεύει από πιθανή μόλυνση. Πρέπει να φυλάσσετε μόνο στην κατάλληλη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ -5° C και +40° C χωρίς επίδραση της υπερϊώδους ακτινοβολίας.

### Επαναχρησιμοποίηση της μάσκας προσώπου "Safe Mask"

Η μάσκα προσώπου "Safe Mask" είναι μία επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα. Μπορεί να καθαριστεί σε ζεστό νερό (πάνω από 60° C) χωρίς πρόσθετα και να χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές. Επίσης είναι δυνατός ο καθαρισμός με ένα απολυμαντικό σπρέι.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας - Κύπρου - Βαλκανίων

Κολοκοτρώνη 95, Πεύκη 151 21, Αθήνα

Τηλ.: 210 802 3599 • Fax: 210 5765089

email : [info@newoptical.gr](mailto:info@newoptical.gr) • [www.newoptical.gr](http://www.newoptical.gr)





# SafeMask®

αποστειρωμένη μάσκα  
με 10 φίλτρα

Καινοτομία με φίλτρο FFP2

ΕΔΩ  
θα βρείτε



## Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα προσώπου

με ευέλικτη εφαρμογή και εναλλάξιμο φίλτρο



και παιδική

new  
optical  
SOLUTIONS

Κοκκαστρέων 99, Πλεστή 151 27, Αθήνα

Tel.: 210 812 3599, email: info@newoptical.gr

www.newopticalsolutions.gr



## Informations sur les masques :


Fabricant : Ako-Kunststoffe Alfred Kolb GmbH  
Marque : Masque  
Modèle : Taille S  
Type : FFP2  
Numéro d'article : B9571  
Numéro EAN : 427001321121

### Statut Global du Rapport :

#### TAPE NOSE

Masque FFP2/3. Testé selon l'Alternative Test Protocol 2  
(ATP 2)

### Revu et Approuvé par :

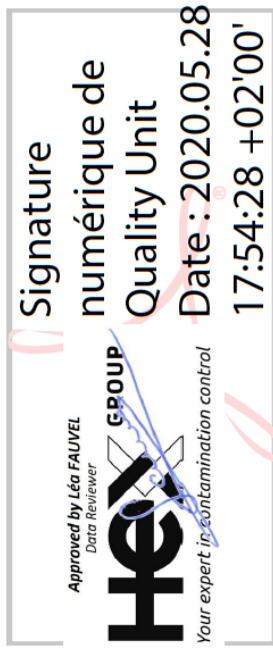

\*Test des masques buccaux de type FFP2 selon l'ATP2 mis au point par HeX GROUP en coopération avec le SPF Economie

HeX - Hygiene Expertise SPRL  
Porte des bâtisseurs, 145  
B-7730 Estaimpuis - Belgium  
TVA/BTW 0523 915 806

HandBrake

E-mail: [info@hex-group.eu](mailto:info@hex-group.eu)  
Web site: <http://www.hex-group.eu>

## Protocole de test alternatif 2 (Alternative Test Protocol 2, ATP 2)

sur masque de type FFP ou équivalent\*

dont rapport d'essai : Penetration of Filter Material (PFM) et Total Inward Leakage (TIL)

### Informations client

|                 |                                                                      |                                 |                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Client :</b> | Ako-Kunststoffe Alfred Kolb GmbH<br>Grobe Minke 10<br>74889 Sinsheim | <b>Site client :</b>            | Ako-Kunststoffe Alfred Kolb GmbH<br>Bergstrasse29 a<br>69120 HEIDELBERG |
| <b>Groupe :</b> | Ako-Kunststoffe Alfred Kolb GmbH                                     | <b>Nom du référent client :</b> | Mme Murielle Pensédent                                                  |

### Informations de traçabilité :

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| N° identification de la FI :                          | 201055                       |
| N° identification du rapport :                        | AKO01-2-03-200528-1_ATP2 FFP |
| Date d'édition du rapport :                           | 28 mai 2020                  |
| Nombre de pages de rapport :                          | 12                           |
| Numéro d'enregistrement BCE :                         | N/A                          |
| Bordereau aérien de transport (AWB) :                 | N/A                          |
| Numéro de douane du dossier de la livraison bloquée : | N/A                          |
| Lieu où se trouve la livraison bloquée :              | N/A                          |



## Avant-propos & contexte (1/4)

Les autorités et les clients ayant commandé des masques de type FFP ou équivalent constatent que les masques de protection proposés ne disposent pas des déclarations, certificats et rapports de tests nécessaires selon les normes européennes ou internationales. Pour cette raison, HeX Group a développé un protocole de test alternatif (Alternative Test Protocol, ATP) pour permettre tout de même de mesurer, de classer et d'orienter l'utilisation de ces masques. En raison de l'épidémie de COVID-19, l'approvisionnement en divers matériels de protection y compris les masques respiratoires de type FFP ou équivalent, devient plus difficile.

### Protocole de test alternatif (ATP)

L'ATP n'examine que les résultats de l'efficacité de la filtration et le coefficient d'ajustement. Ce sont les paramètres les plus importants dans le contexte actuel.

En fonction des résultats obtenus selon l'ATP, les masques de protection pourront être utilisés en fonction du niveau de risque des populations concernées.

### Avantages du protocole de test alternatif (ATP)

Ce protocole permet de déterminer si les masques non conformes, qui ne pourraient pas être libérés dans des circonstances normales, sont de qualité suffisante pour être utilisés comme masques de protection dans la situation de crise actuelle et surtout de hiérarchiser et de classer ces masques pour une utilisation pragmatique en fonction du niveau de risque des personnes qui les portent.

HeX ne revendique absolument pas de se substituer à un rapport d'essais conduisant à la conformité suivant les exigences exhaustives et complètes de la norme EN 149+A1:2009.

HeX a donc décidé d'utiliser son expérience de laboratoire d'essais, d'analyses, d'étalonnages accrédités depuis plusieurs années et spécialisé dans la maîtrise de la contamination, pour proposer deux essais rapides, efficaces avec une maîtrise de la qualité des résultats permettant de mesurer l'efficacité de masques de type FFP ou équivalent.

Deux types d'essais et complémentaires sont donc proposés :

- l'essai de pénétration particulière de la membrane filtrante
- l'essai d'ajustement (ou essai de fuite ou TIL ou aussi FIT TEST).



Since April 7, 2020, the AFMPS / FAGG directive authorize the reuse of single-use masks (FFP2-FFP3).

HeX Group supports you to test its effectiveness, integrity, and contamination and offers you Performance test (penetration rate via particulate aerosol)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Ν.Π.Δ.Δ.  
Ακαδημίας 7 – 106 71 Αθήνα,  
Τηλ.: 210 3604815-9, 210 3602411  
www.acci.gr – e-mail: registry@acci.gr

Αθήνα, 24/04/2020

Αρ. Πρωτοκόλλου: 3823 / 24/04/2020

Σελίδα: 1 από 2

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ πιστοποιεί ότι, όπως εξάγεται από τα Μητρώα του, είναι εγγεγραμμένη σ' αυτά η κατωτέρω επιχείρηση, με τα εξής στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: NEW OPTICAL SOLUTIONS Ε.Ε.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : Ε.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 306428

ΔΙΑΚΡ. ΤΙΤΛΟΣ : NEW OPTICAL SOLUTIONS

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 140351401000

ΧΡΟΝ. ΙΔΡΥΣΗΣ : 24/10/2016 - ΗΜ/ΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 24/10/2016

ΑΦΜ : 800770752

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95 , Τ.Κ. 15121 ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΕΥΚΗ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

46461200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

46181100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΩΔΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ, ότι η ανωτέρω Επιχείρηση:

1ο. Έχει εκπληρώσει, τις προς ΕΒΕΑ, υποχρεώσεις της από συνδρομές μέχρι και 31/12/2020

2ο. Παρατηρήσεις : -

3ο. Την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού ζήτησε η ανωτέρω Επιχείρηση για να το χρησιμοποιήσει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ.

**ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Μπορείτε να ελέγξετε τη γνησιότητα του παρόντος στο

<https://echamber.acci.gr/echamberEBEA/publicDocVerification/docForm?authCode=627yDW9c4&docType=1> κάνοντας χρήση του

Η εγγραφή στο ΕΒΕΑ και η χορήγηση του πιστοποιητικού αυτού δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας ούτε την αναπληρώνει, όπου αυτή απαιτείται από ειδικές νομοθετικές διατάξεις.

Ε/ΜΗΤΡ.1120-02/1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Ν.Π.Δ.Δ.  
Ακαδημίας 7 – 106 71 Αθήνα,  
Τηλ.: 210 3604815-9, 210 3602411  
www.acci.gr – e-mail: registry@acci.gr

**Αθήνα, 24/04/2020**

**Αρ. Πρωτοκόλλου: 3823 / 24/04/2020**

**Σελίδα: 2 από 2**

Κωδικού Γνησιότητας 627yDW9c4.



Health Technology Certification

# ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004

Με το παρόν βεβαιώνουμε ότι η εταιρεία:

## NEW OPTICAL SOLUTIONS E.E.

**Κολοκοτρώνη 95  
Πεύκη 15121, Αθήνα**

Εφαρμόζει τις Αρχές και τις  
Κατευθυντήριες Γραμμές για την

**“Ορθή Πρακτική Διανομής  
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων”**

Αριθμός Βεβαίωσης: **1404 C06 19 09 01**

Έκθεση Επιθεώρησης: **PIR00000064/1626012**

Ημερομηνία έκδοσης: **30/09/2019**

Ισχύει ως: **02/02/2020**

Η HTCert είναι Κοινοποιημένος  
Οργανισμός σύμφωνα με την  
Οδηγία 93/42/ΕΟΚ με αριθμό  
αναγνώρισης **2803**

# HTCert

Για την HTCert

**ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ**  
Διευθύνων Σύμβουλος

**ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΤΗΣ**  
Διευθυντής Πιστοποίησης

# Q-CERT

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/CERTIFICATE

Η QMSCERT, ένας διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρήσεων τρίτου μέρους και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ISO 9001 λειτουργώντας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 17021 πιστοποιεί ότι ο οργανισμός:

### NEW OPTICAL SOLUTIONS E.E.

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95, Τ.Κ. 15121, ΠΕΥΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ

με πεδίο εφαρμογής:

*Εισαγωγή, Εμπορία & Διακίνηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού,  
Ιατρικών Μηχανημάτων, Φακών Επαφής, Υγρών για Φακούς Επαφής &  
Αναλώσιμων Οπτικών & Χειρουργικών Προϊόντων*

έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι  
σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο

**ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015**

27 Σεπτεμβρίου, 2021

Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης

28 Σεπτεμβρίου, 2018

Ημ/νία Αρχικής Πιστοποίησης

28 Σεπτεμβρίου, 2018

Ημερομηνία Πιστοποίησης

IAF/EA Υποτομέας: 29.3

Για το Συμβούλιο της QMSCERT

Η πιστοποίηση αυτή υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο. Η ισχύς του πιστοποιητικού (3 έτη) προϋποθέτει ότι πραγματοποιούνται με επιτυχία οι ετήσιες εποπτικές επιθεωρήσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκυρότητα του πιστοποιητικού μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.qmscert.com](http://www.qmscert.com)



QMSCERT® No 280918-5

Πιστοποίηση ΣΔ  
Αρ. Πιστ. 110-6

QMSCERT

26<sup>th</sup> OCTOBER Str. 90 - GR 546 27 - THESSALONIKI - HELLAS





**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**EXCLUSIVE REPRESENTATIVE**



**ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95**

**15121 ΠΕΥΚΗ**

**ΑΘΗΝΑ – ΕΛΛΑΔΑ**

**ΤΗΛ.: (+30) 210 8023599**

***mob. (+30) 6947310760***

***email : [info@newoptical.gr](mailto:info@newoptical.gr)***

***website: [www.newoptical.gr](http://www.newoptical.gr)***